

Mini andador de entrenamiento de la marcha Pacer

Manual del producto K610




Índice

Información importante	3
Mensajes de seguridad	3-4
Recomendaciones de uso y medidas del artículo	5
Revise su pedido	6
Componentes básicos	
Chasis	6
Ruedas giratorias	7
Accesorios	
Odómetro	8
Abrazaderas	8
Asas manuales	8-9
Apoyos para brazos	10-12
Apoyo para el pecho	13
Posicionador de cadera	14-15
Almohadilla del posicionador de cadera	16
Apoyo pélvico	17-18
Apoyos para tobillos	19
Bandeja	20
Barra guía	21
Funcionamiento	22-25
Mantenimiento, limpieza y garantía	26
Materiales y modificaciones del usuario	27

Claves para los usuarios

Use esta clave para determinar qué secciones de este manual del producto son importantes para usted.

 **Usuarios técnicos** Para profesionales que piden y montan productos Rifton.

 **Usuarios domésticos** Para cuidadores que usan productos Rifton regularmente.

 **Personal de mantenimiento** Para cualquier persona responsable del mantenimiento o de pedidos repetidos de productos y piezas Rifton.

IMPORTANTE

Guarde esta manual del producto para futuras consultas. Hay copias adicionales disponibles en <http://www.rifton.com/customer-service/product-manuals>.

ADVERTENCIA



- Lea atentamente y comprenda la información de esta manual del producto antes de intentar utilizar el producto. La falta de seguimiento de los procedimientos y las instrucciones de este manual del producto puede causar lesiones graves o la muerte.
- Un profesional cualificado debe evaluar la idoneidad y seguridad de todo el equipo para cada usuario.
- Este producto está destinado a su uso en niños con juicio no confiable, por lo que en todo momento se requiere la supervisión de un adulto.

continúa...

ADVERTENCIA



- Para evitar caídas y lesiones:
 - No use este producto sobre superficies rugosas y desiguales, ni en las proximidades de piscinas o escaleras.
 - Compruebe que las correas y los soportes estén bien sujetos en todo momento. Las correas y los soportes se suministran para la seguridad del usuario y deben ajustarse cuidadosamente para lograr la mayor comodidad y seguridad.
 - Apriete bien todos los mandos de ajuste antes de usar el producto e inmediatamente después de realizar cualquier ajuste.
 - Coloque los accesorios de modo que el peso del niño quede centrado entre las ruedas giratorias.
- No use este producto con niños que no cumplan los límites de talla y peso especificados en este manual.
- Para prevenir fallos estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:
 - Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios el aflojamiento o la ausencia de tornillos, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas que faltan, la inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
 - Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
 - No use los componentes o productos de Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.
- Supervise adecuadamente el uso del Pacer para evitar:
 - Movimiento y velocidad excesivos
 - Paradas repentinas por golpear un bordillo, grietas o residuos
- Utilice los accesorios adecuados para garantizar que los pies del usuario queden dentro de los límites del chasis del Pacer.
- Preste especial cuidado y supervisión cuando use el Pacer en condiciones que puedan afectar a la estabilidad, como:
 - Suelos irregulares
 - Rampas, cuestas o pendientes
 - Niños que experimenten movimientos involuntarios fuertes o convulsiones

Recomendaciones de uso

El andador de entrenamiento de la marcha es un producto sanitario de clase I. Se diseñó para ayudar a que niños con impedimentos aprendan a caminar. En niños que no hacen un uso activo de los músculos del tronco y las piernas, el Pacer proporciona la ayuda necesaria durante el entrenamiento de la marcha y requiere apoyo de peso mínimo o nulo.

El mini Pacer se recomienda en niños con altura del codo de 15½"–20½" (39–52 cm). La carga de trabajo máxima del mini Pacer es de 50 lb (23 kg).

Medidas del usuario y dimensiones del artículo

Medidas del usuario - pulgadas (cm)

K610 mini

Altura del codo

15½-20½ (39-52)

**Medida clave del usuario: altura del codo**

Mida la distancia vertical que hay desde el codo doblado hasta el suelo mientras el usuario está de pie. Elija un andador de entrenamiento de la marcha que se adapte al crecimiento.

Medidas del artículo - pulgadas (cm)

Altura del soporte del brazo	15½-20½ (39-52)
Anchura total	20½ (52)
Longitud total	22 ½ (57)
Altura del soporte del pecho (borde superior)	17½-22½ (44-57)
Altura del chasis	12½ (32)
Peso del chasis - lb (kg)	10 ¼ (4,6)
Carga máxima de trabajo - lb (kg)	50 (23)
Circunferencia del soporte del pecho - in (cm)	14-28 (36-71)

Revise su pedido

El chasis del Pacer y los accesorios que especificó en su pedido se envían juntos en una sola caja (excepto la barra guía). Use los diagramas de este manual para asegurarse de que su pedido esté completo.

Si su envío está incompleto o dañado de alguna manera a su arribo, llame a Servicio de atención al cliente, al 800.571.8198.

Artículo básico

Chasis

Ajustes

Figura 6a: Todos los ajustes de altura se realizan elevando y descendiendo los apoyos. El chasis está fijo y no se ajusta.



Figura 6a

Ruedas giratorias

Ajustes

Figura 7a:

El **bloqueo basculante** evita que la rueda gire.

- Para **activar el bloqueo basculante**: apriete el botón (A).
- Para **desactivarlo**, apriete el botón (B).

Si se bloquean las cuatro ruedas giratorias, la trayectoria del niño será en línea recta.

El bloqueo de las ruedas giratorias traseras (las que están detrás del niño) ayudará a estabilizar al niño, al tiempo que aún le permiten girar.

Para activar el freno de las ruedas giratorias (C), pulse la parte inferior del pedal de freno. Para soltar el freno, pulse la parte superior del pedal de freno.

Para activar la resistencia de la rueda, gire el dial (E).

El **bloqueo basculante (F)** permite que la rueda giratoria solo gire en una dirección, lo cual es útil con niños que podrían desplazarse involuntariamente hacia atrás cuando intentan caminar. Para activar el bloqueo basculante:

- Baje la palanca (F) hasta que encaje a presión.
- Cuando está activado el bloqueo basculante, la rueda giratoria hará un ruido de chasquido cuando se mueve hacia adelante y se bloqueará cuando se empuje hacia atrás.

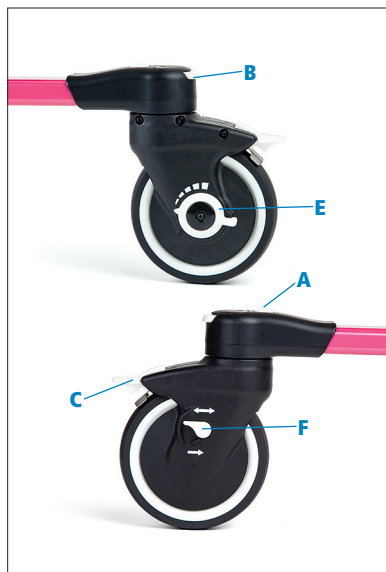


Figura 7a

Accesorios

Odómetro

Figura 8a: El odómetro muestra la distancia recorrida. Para reiniciar la pantalla a 0, pulse el botón (A). Para visualizar la distancia total recorrida desde el comienzo del uso, apriete y mantenga pulsado el botón (A) durante un segundo. La distancia total se visualizará en kilómetros o miles de pies, dependiendo del ajuste de unidad.

Para cambiar entre pies y metros, apriete y mantenga pulsado el botón (A) hasta que cambie las unidades (aproximadamente 10 segundos).



Figura 8a

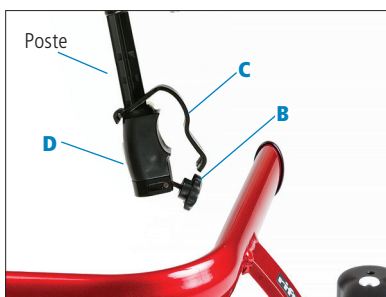


Figura 8b

Abrazaderas

Montaje

Figuras 8b y 8c: La mayoría de los accesorios se fija al chasis con abrazaderas y postes:

1. Afloje el pomo (B) y gírelo hacia abajo.
2. Gire la banda (C) hacia arriba.
3. Coloque la abrazadera (D) alrededor de la barra ovalada.
4. Gire el pomo hacia arriba.
5. Apriételo bien.

La colocación de los accesorios del chasis variará según la posición y capacidades del niño, así como la cantidad de accesorios que se utilicen.



Figura 8c

Asas manuales

Montaje

Figura 8d: Se recomienda instalar las asas manuales por delante de los montantes principales del chasis. Esto hace que la posición sea más estable y deja espacio para otros accesorios.



Figura 8d

Figura 9a: Para niños más delgados, las abrazaderas de cualquier accesorio se pueden montar por dentro de la barra superior. De este modo, los apoyos quedarán más cerca del niño.

Figura 9b: Las abrazaderas de las asas manuales se pueden montar por la fuera de la barra superior.

Ajustes

Figura 9a:

Afloje el pomo (A) para:

- Extraer completamente el asa manual y la abrazadera.
- O deslice el asa manual acercándola o alejándola del niño a lo largo de la barra superior.

Para ajustar la altura del asa manual:

- Presione el botón (B) y deslice la barra hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.
- Suelte el botón (B) y pulse el asa manual para meter la barra.

Para inclinar el asa manual:

Afloje el pomo (C) e incline el asa manual hasta la posición deseada. Apriete bien el pomo.

Para volver a colocar el asa manual completa:

- **Figuras 9a y 9b:** Retire completamente el asa manual del Pacer. Móntela por dentro o por fuera de la barra superior.
- **Figura 9a:** Presione el botón (B) y retire completamente el poste, gírelo hasta la posición deseada, vuelva a insertarlo en la abrazadera y deslícelo hasta la altura deseada (consulte la página 12).



Figura 9a Montado por dentro de la barra superior



Figura 9b Montado por fuera de la barra superior

Apoyos para brazos

Montaje

⚠ ADVERTENCIA Para evitar volcaduras y las lesiones consecuentes, no coloque los apoyos en la parte delantera de la barra superior (consulte la Figura 10a).

Figuras 10b y 10c: Se recomienda instalar los apoyos para brazos justo por delante de los montantes principales del chasis. Esto hace que la posición sea más estable y deja espacio para otros accesorios.

Figura 10b: Las abrazaderas de los apoyos para brazos se pueden montar por fuera de la barra superior.

Figura 10c: En el caso de niños más delgados, las abrazaderas de cualquier accesorio se pueden montar por dentro de la barra superior. De este modo, los apoyos quedarán más cerca del niño.

(Para volver a colocar las abrazaderas y postes, consulte las páginas 8 y 12).



Figura 10a



Figura 10b Barra superior montada por fuera



Figura 10c Barra superior montada por dentro

Ajustes

Figuras 11a y 11b:

Afloje el pomo (A) para:

- Deslizar la almohadilla de brazo hacia el niño o alejarla.
- Girar hacia arriba o hacia abajo.
- Girar hacia dentro o hacia fuera.
- Mover la almohadilla de brazo hacia atrás o hacia delante.

Para ajustar la altura del apoyo para brazos:

1. Presione el botón (B) y deslice la barra hasta la posición deseada.
2. Suelte el botón y presione el poste para introducirlo.

Para ajustar el asa manual:

1. Afloje el pomo (C).
2. Deslice el asa manual hacia delante o atrás, según la longitud del antebrazo.
3. Gire el asa manual de un lado al otro.

La correa para el brazo (D) y la correa para la muñeca (E) fijan el brazo del niño en el apoyo para brazos.

Utilizar la correa para la muñeca evita que el brazo del niño se salga accidentalmente del apoyo para brazos.

Para volver a colocar el apoyo para brazos completo:

1. Afloje el pomo (F).
2. Deslice el apoyo para brazos a la posición deseada en el chasis.

También puede extraer completamente el apoyo para brazos del Pacer presionando el botón (B) y sacando entonces el poste.



Figura 11a



Figura 11b

Figura 12a:

Los **postes del apoyo para brazos** se pueden quitar y colocar de nuevo para ajustar la anchura que hay entre tales apoyos.

Las **abrazaderas del apoyo para brazos** se pueden quitar y colocar de nuevo para ajustar más la anchura entre los apoyos para brazos.

- En los pasos 1 y 2, se muestra la abrazadera por dentro de la barra superior.
- En el paso 3, se muestra la abrazadera por fuera de la barra superior, lo cual aumenta la anchura entre los apoyos.
- Consulte instrucciones sobre la retirada y recolocación de las abrazaderas en la página 8.



Figura 12a

Figura 12b:

Dedique tiempo a familiarizarse con los ajustes en cada apoyo para brazos.

Los apoyos para brazos se pueden:

1. Girar alrededor de la sección horizontal del poste.
2. Girar 360° en torno a la barra vertical.
3. Meter o sacar en la sección horizontal del poste.
4. El poste de sujeción de abrazadera se puede mover a lo largo de la barra superior.
5. La barra tiene cuatro posiciones, cada una de ellas a 90°.



Figura 12b

Apoyo para el pecho

Montaje

⚠ ADVERTENCIA Para evitar tropezones, caídas y las consecuentes lesiones o la muerte:

- Coloque el apoyo para el pecho de forma que el centro de gravedad del niño quede centrado entre las ruedas giratorias.
- Apriete todos los mandos de ajuste del apoyo para el pecho antes de usarlo.

Figura 13a: Coloque el apoyo para el pecho directamente por detrás de los montantes principales del chasis. La parte delantera del apoyo para el pecho tiene un anillo de contención que hace que las almohadillas no se separen. La parte trasera se abre para fácil acceso.

Ajustes

Para ajustar la anchura del apoyo para el pecho:

- Coloque las abrazaderas en la parte interior o exterior de la barra superior (consulte las páginas anteriores).
- Afloje los pomos giratorios (C) para meter o sacar los laterales del apoyo para el pecho.
- Vuelva a apretar los pomos giratorios.

Para girar el apoyo para el pecho:

- Afloje completamente los pomos giratorios (C).
- Gire el apoyo hasta la posición deseada.
- Vuelva a apretar los pomos giratorios.

Para ajustar la altura del apoyo para el pecho:

- Presione los botones (B) y deslice las barras hasta la altura deseada.
- Suelte los botones (B) y presione las barras para introducirlas.



Figura 13a

Vuelva a colocar o extraiga completamente el apoyo para el pecho:

- Afloje los pomos giratorios (A).
- Deslice el apoyo para el pecho hacia atrás o hacia delante y vuelva a apretar los pomos giratorios (A).
- Para quitar las abrazaderas, consulte la página 8.

Las correas (D) se pueden ajustar independientemente para apretar o aflojar el apoyo para el pecho o para ajustar el ángulo de inclinación hacia delante del niño. El apoyo para el pecho se abre tanto por delante como por detrás. Esto permite colocar al niño en posición anterior o posterior (consulte las páginas 22–25).

Posicionador de cadera



Montaje

⚠ ADVERTENCIA Para evitar volcaduras y las lesiones consecuentes, no coloque los apoyos en los extremos posteriores de la barra superior (consulte la Figura 14a).

Figura 14b: El posicionador de cadera se diseñó a modo de fomentar la inclinación hacia adelante. Coloque este accesorio con sus dos abrazaderas y asas manuales cerca de la parte posterior de la barra superior, y las correas con hebillas (A) por delante de los montantes del chasis.

Para montar la parte delantera del posicionador de cadera:

- Use las hebillas (A) para montar las correas en la ubicación más adecuada para su posicionamiento. Las correas se pueden ajustar en cualquier posición segura de la barra superior del chasis por delante los montantes principales, en la base de las abrazaderas/accesorios en uso o en la barra del apoyo para el pecho.

Para montar la parte posterior del posicionador de cadera:

- Monte los anillos (B) en las asas manuales.



Figura 14a

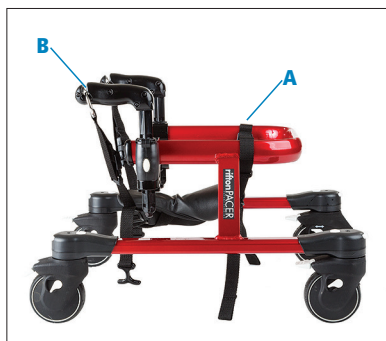


Figura 14b

Ajuste

Figura 15a:

Para ajustar la posición de los agarres manuales en el chasis:

- Afloje el pomillo (A).
- Deslice las asas manuales y las abrazaderas hasta la posición deseada en el chasis.

Para ajustar la altura de la parte posterior del posicionador de cadera:

- Presione el botón (D) y eleve las asas manuales hasta la altura deseada.
- Suelte el botón (D) y presione las asas manuales para introducirlas.

Para subir y bajar el posicionador de cadera, utilice las tiras de ajuste de las correas (C) que hay detrás (D) y delante.

Los niños usualmente están más a gusto con la parte posterior del posicionador de cadera más abajo que la parte frontal. A fin de lograrlo, acorte las correas delanteras (D) y fíjelas tan arriba como sea posible.



Figura 15a

Almohadilla del posicionador de cadera



Montaje

Figuras 16a y 16b:

1. Presione las correas posteriores del posicionador de cadera a través de las correas cruzadas y tire de la almohadilla hasta que quede en su sitio.
2. Cierre las solapas delantera y lateral de **la almohadilla** a la vez, alrededor del **posicionador de cadera**. Asegúrese de que ambos cierres estén bien fijados.
3. Monte el posicionador de cadera sobre el Pacer.



Figura 16a



Figura 16b Parte inferior del posicionador de cadera con almohadilla

Apoyo pélvico

Montaje

⚠ ADVERTENCIA Para evitar volcaduras y las lesiones consecuentes, no coloque los apoyos en los extremos posteriores de la barra superior (consulte la Figura 17a).

Figura 17b:

El apoyo pélvico ofrece asistencia a la hora de apoyar peso. Es una alternativa al posicionador de cadera. Coloque este accesorio con sus dos abrazaderas y asas manuales cerca de la parte posterior de la barra superior, y las correas con hebillas (A) por delante de los montantes del chasis.

Para montar la parte delantera del apoyo pélvico

- Use las hebillas (A) para montar el apoyo pélvico en la ubicación más adecuada para su posicionamiento. Las correas se pueden ajustar en cualquier posición segura de la barra superior del chasis por delante los montantes principales, en la base de las abrazaderas/accesorios en uso o en la barra del apoyo para el pecho.

Para montar la parte posterior del apoyo pélvico

- Monte los anillos en las asas manuales (B).



Figura 17a



Figura 17b

Ajuste

Figura 18a:

Para ajustar la altura de la parte posterior del apoyo pélvico:

- Presione los botones (B) y deslice los agarres hasta la altura deseada.
- Suelte los botones (B) y presione los agarres manuales para introducirlos.

Para ajustar la posición de los agarres manuales en el chasis:

- Afloje el pomo (A).
- Deslice los agarres y las abrazaderas hacia delante o hacia atrás en el chasis.

Para subir y bajar el apoyo pélvico:

- Use las tiras de ajuste de las correas (C) y (D) que hay en la parte trasera o delantera del apoyo pélvico.

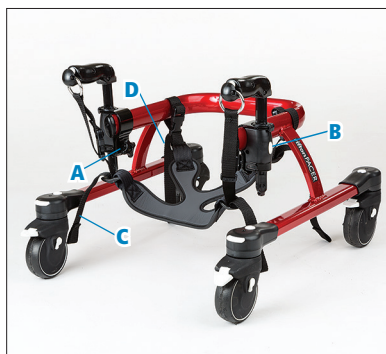


Figura 18a

Apoyos para tobillos

Montaje

Figura 19a:

- Inserte los cierres del apoyo para tobillos en las ranuras de la parte inferior de los tubos del chasis del Pacer. El diente blanco debe encajar de manera segura en el tubo.
- Para la retirada, pulse el botón blanco en el cierre y libere el diente de la ranura.



Figura 19a

Ajustes

Figura 19b:

1. Para fijar, aflojar o apretar la correa alrededor del tobillo del niño, use la tira de ajuste de la hebilla (A).
2. La correa (B) se puede ajustar para ayudar a guiar la zancada del niño.
3. Para reducir o aumentar la zancada del niño, apriete y deslice los ajustadores de resorte (C) a lo largo de las varillas.

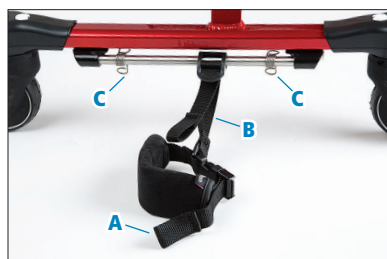


Figura 19b

Bandeja

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar vuelcos y las consecuentes lesiones:

- No utilice la bandeja como limitador ni para soportar el peso del cuerpo.
- Supervise directamente el uso de la bandeja por el niño.
- No coloque más de 10 lb (4,5 kg) sobre la bandeja.

Montaje

1. **Figura 20a:** Para estabilidad máxima, instale la bandeja centrada en la parte anterior de la barra superior.
2. El peso máximo que se puede colocar sobre la bandeja es de 10 lb (4,5 kg).

Ajuste

Figuras 20a y 20b:

Para ajustar el ángulo de la bandeja:

- Afloje el pomo (C).
- Cambie el ángulo de inclinación de la bandeja.
- Gire la bandeja de un lado a otro.

Para ajustar la altura de la bandeja:

- Presione el botón (B).
- Deslice la barra hasta la altura deseada.
- Suelte el botón (B) y empuje la bandeja hacia arriba o abajo para introducirla en el poste.

Para reposicionar la bandeja en el chasis del Pacer:

- Afloje el pomo (A).
- Deslice la abrazadera con la bandeja a lo largo de la barra superior.



Figura 20a



Figura 20b

Para extraer la pieza de inserción (D):

- Empuje con los dedos a través de los orificios de la bandeja (G).
- Vuelva a instalar la pieza de inserción (D) metiendo las pestañas (E) en las ranuras (F) y presionando hacia abajo en el borde delantero de la pieza de inserción hasta que encaje a presión.

Barra guía

⚠ ADVERTENCIA Para evitar lesiones, se requiere la supervisión de un adulto en todo momento. Retire siempre la barra guía cuando no la esté usando.

Montaje

1. **Figura 21a:** Para estabilidad máxima, instale la barra guía centrada en la parte anterior de la barra superior.
2. La barra guía se instala apretando el pomo (A) para abrazarla.



Figura 21a

Ajustes

1. **Figura 21b:** Gire la barra guía hasta que esté detrás del niño para empujarla o por delante del niño para que tire de ella el cuidador.
2. **Figura 21a:** Apriete el pomo (A) para que la barra guía se mantenga a la altura deseada cuando se suelte el mango.



Figura 21b

Funcionamiento

Una vez que los accesorios estén montados y ajustados de forma aproximada, se puede colocar al niño en el Pacer, ya sea en posición anterior o posterior.

Posicionamiento anterior

⚠ ADVERTENCIA Para evitar vuelcos y las consecuentes lesiones:

- Coloque los apoyos de forma que el centro de gravedad del niño quede centrado entre las ruedas giratorias.
- Utilice los accesorios adecuados para garantizar que los pies del niño se mantengan dentro de los límites del chasis del Pacer.
- No coloque los apoyos para brazos ni los agarres manuales en los extremos de la barra superior.

Mirando hacia delante

Figuras 22a y 22b: Se muestra la posición normal. Tenga en cuenta que el apoyo para el pecho no se inclina, de modo que el leve ángulo de inclinación del niño hacia delante se logra situando el posicionador de cadera/apoyo pélvico por detrás de los hombros.

1. Aplique los frenos de las ruedas giratorias para inmovilizar el Pacer.
2. Aproxime los ajustes de:
 - apoyo para el pecho
 - apoyos para brazos
 - posicionador de cadera o apoyo pélvico
3. Abra:
 - Anillos del posicionador de cadera o apoyo pélvico en la parte posterior del Pacer
 - Las hebillas en la parte posterior del apoyo para el pecho
 - Correas de los apoyos para brazos y apoyos para tobillos



Figura 22a



Figura 22b

4. Coloque al niño en el Pacer
 - Cierre las hebillas posteriores del apoyo para el pecho.
5. Tire del posicionador de cadera o el apoyo pélvico entre las piernas del niño y conecte los anillos con los agarres manuales (o asegure las hebillas, si lo prefiere).
6. Asegure los antebrazos del niño con las correas del apoyo para brazos o coloque las manos del niño en las asas manuales.
7. Fije las correas de los apoyos para tobillos alrededor de los tobillos del niño.
8. Desactive los frenos de las ruedas giratorias.



Figura 23a

Inclinación hacia delante

Figura 23a: Se muestra cómo lograr una posición de mayor inclinación hacia delante. Observe la inclinación del apoyo para el pecho y la ubicación del posicionador de cadera detrás de los hombros. Las correas delanteras del posicionador de cadera se montan en las barras del apoyo para el pecho. Las abrazaderas de las asas manuales se fijan en la parte delantera de la barra superior.

1. Para ajustar el ángulo de inclinación hacia delante del niño:

- Utilice el ajuste de la inclinación del apoyo para el pecho.
- Mantenga la parte superior del apoyo para el pecho lejos de las axilas, para evitar presión y molestias.

2. Ajuste el posicionador de cadera o el apoyo pélvico:

- Ajuste la altura de las barras de los agarres manuales.
- Utilice las correas para ajustar el ángulo del posicionador de cadera o del apoyo para el pecho y coloque la pelvis del usuario en el ángulo deseado de inclinación hacia delante en relación con el apoyo para el pecho.

3. Ajuste los apoyos para brazos y las asas manuales:

- Para ajustar la anchura, altura y ángulo de los apoyos para brazos (consulte las páginas 10-12).
- Para ajustar las asas manuales (consulte las páginas 8 y 9).

4. Ajuste los apoyos para tobillos:

- Ajuste las correas y los ajustadores de resorte para guiar la zancada del niño (consulte la página 19).

5. Ajuste la posición y el ángulo de la bandeja (consulte la página 20).

6. Desactive los frenos de las ruedas giratorias.

Posicionamiento posterior

Figura 25a: Se puede colocar a los niños en el Pacer mirando hacia la parte posterior (extremo abierto) del chasis. Esto se llama posicionamiento posterior y permite que los usuarios más avanzados se muevan libremente, sin obstrucciones por debajo o delante de ellos.

Los niños en posicionamiento posterior generalmente requieren menos apoyos y menos accesorios.

- Los apoyos para brazos o asas manuales se deben fijar tan cerca como sea posible de los montantes principales del chasis. Consulte información de seguridad importante en las advertencias de las páginas 3 y 4.
- El apoyo para el pecho (si se usa) se abre por delante y detrás para facilitar las transferencias durante el posicionamiento posterior.



Figura 25a

Para cambiar la configuración posterior

- 1. Aplique los frenos de las ruedas giratorias** para inmovilizar el Pacer.
- 2. Gire los accesorios** de forma que miren hacia el extremo abierto del chasis del Pacer y vuelva a montar la barra superior.
- 3. Restablezca los bloqueos de dirección**, en dirección opuesta, si fuera necesario (consulte la página 7).
- 4. Si son necesarios otros apoyos**, siga las instrucciones sobre posicionamiento anterior, a la inversa (consulte las páginas 22–24).
- 5. Desactive los frenos de las ruedas giratorias.**

Consulte más detalles sobre los accesorios, el funcionamiento y las recomendaciones de uso en www.rifton.com/pacer

Mantenimiento

Este producto está diseñado y probado para una vida útil de 5 años si se utiliza y mantiene de acuerdo con este manual. Los usuarios deben, en todo momento, asegurarse de que el producto permanece en condiciones seguras y utilizables, lo que incluye el mantenimiento y las inspecciones regulares que se especifican en este manual.

Para prevenir fallos estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios el aflojamiento o la ausencia de tornillos, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas que faltan, la inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
- Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
- No use los componentes o productos de Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.
- Sustituya o repare los componentes o los productos que estén dañados o que parezcan inestables.
- Utilice solo repuestos autorizados de Rifton. La información sobre pedidos de piezas de recambio figura en la contraportada de este manual del producto.

No use lubricantes con petróleo o disolventes en las ruedas giratorias, pero lubrique si es necesario con un pulverizador de silicona o grafito.

Limpieza

Cuando sea necesario, limpie con toallitas desinfectantes o una solución con el 10 % de lejía como máximo. No utilice cantidades excesivas de agua.

Las correas con cierres velcro se pueden lavar. Enganche los cierres antes del lavado. No planchar.

Lave las ruedas giratorias con agua después de un uso en exteriores. Evite el barro y la arena.

Declaración de garantía


Si un producto Rifton se avería o no funciona durante el primer año, lo reemplazaremos sin cargo.

Materiales

- Los artículos metálicos de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc.) suelen ser galvanizados o niquelados o de acero inoxidable.
- Los artículos de tapicería (almohadillas, bloques de apoyo, apoyos almohadillados, etc.) suelen estar hechos de espuma de poliuretano con cubierta ignífuga de vinilo expandido.
- Los chasis normalmente se componen de tubos de acero o de aluminio, soldados entre sí, y recubiertos por un acabado de pintura al horno. Algunos componentes del chasis también pueden ser de acero inoxidable.
- Las correas están hechas habitualmente de tejido de polipropileno o nailon.
- Normalmente, los componentes plásticos se moldean por inyección a partir de diversas resinas industriales.

Todos los materiales están exentos de látex, plomo y ftalatos.

Modificaciones del usuario

 ADVERTENCIA Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere los productos o componentes de Rifton, ni utilice productos o componentes de Rifton combinados con productos de otros fabricantes. Rifton no se hace responsable de las posibles modificaciones o alteraciones realizadas en nuestros componentes o productos después de salir de nuestras instalaciones. Los clientes que modifiquen o alteren nuestros componentes o productos o los utilicen junto con productos de otros fabricantes, lo harán bajo su propia responsabilidad.

Información de contacto de Rifton



Correo electrónico
Sales@Rifton.com



Teléfono
800.571.8198
9-5 EST



Correo postal
Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471-0260



Fax
800.865.4674



En línea:
www.Rifton.com

Para pedir piezas de recambio

1. **Localice el número de identificación** del producto en la pequeña etiqueta blanca.
2. Tenga este número a mano cuando llame a su representante del servicio de atención al cliente al **800.571.8198**.

Utilice solo piezas de recambio suministradas por Rifton Equipment.

Nos complace suministrarle piezas de recambio. Aunque Rifton hace todo lo posible por suministrar piezas e instrucciones correctas para la reparación o renovación de su equipo, usted es responsable de garantizar que todas las reparaciones o modificaciones se realicen de forma correcta y segura.



Podrá encontrar cartas de necesidad médica y artículos informativos en:
www.rifton.com/pacer