

Familia de anclajes

Manual del producto de los anclajes de Rifton



CE



Índice

Información importante	2
Mensajes sobre seguridad	3
Recomendaciones de uso y revisión de su pedido	3
Anclajes	
Anclaje de mano	4
Barra de agarre	4
Anclaje de codo	4
Anclaje de muñeca	5
Anclaje horizontal	5
Anclaje de brazo	5
Funcionamiento y mantenimiento	6
Limpieza y garantía	7
Materiales y modificaciones del usuario	7

IMPORTANTE

Guarde esta manual del producto para futuras consultas. Hay copias adicionales disponibles en <http://www.rifton.com/customer-service/product-manuals>.

Claves para los usuarios

Use esta clave para determinar qué secciones de este manual del producto son importantes para usted.



Usuarios técnicos Para profesionales que piden y montan productos Rifton.



Usuarios domésticos Para cuidadores que usan productos Rifton regularmente.



Personal de mantenimiento Para cualquier persona responsable del mantenimiento o de pedidos repetidos de productos y piezas Rifton.

ADVERTENCIA



- Lea atentamente y comprenda la información de esta manual del producto antes de intentar utilizar el producto. La falta de seguimiento de los procedimientos y las instrucciones de este manual del producto puede causar lesiones graves o la muerte.
- Un profesional cualificado debe evaluar la idoneidad y seguridad de todo el equipo para cada usuario.
- Este producto está previsto para usuarios de juicio inestable, por lo que en todo momento se requiere la supervisión de un adulto.
- Para prevenir caídas y las lesiones resultantes, no use los anclajes de Rifton como principal apoyo o como apoyo de bipedestación. Las ventosas se pueden soltar.
- Para evitar caídas y cortes, no use los anclajes de Rifton sobre cristal fino.
- Para prevenir fallos estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:
 - Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios el aflojamiento o la ausencia de tornillos, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas que faltan, la inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
 - Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
 - No use los componentes o productos de Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.

Recomendaciones de uso

La familia de anclajes de Rifton es un producto sanitario de clase 1. Proporciona una selección de anclajes que ofrecen estabilidad a las extremidades superiores para una amplia gama de necesidades de estabilización de los usuarios. Proporciona una selección de anclajes que ofrecen estabilidad a las extremidades superiores para una amplia gama de necesidades de estabilización de los usuarios. El uso de los anclajes está previsto en superficies horizontales, para proporcionar un posicionamiento seguro y anclado de la mano y el antebrazo. No está indicado para superficies verticales o para ayudas durante las transferencias.

Revise su pedido

El equipo viene embalado en una caja de cartón individual. No se necesita montaje.

Si su envío está incompleto o dañado de alguna manera a la llegada, llame al servicio de atención al cliente, 800.571.8198.

Anclajes

Anclaje de mano

Recomendaciones de uso

Figura 4a: Los anclajes de mano se pueden usar sobre cualquier mesa o bandeja de Rifton disponible. Proporcionan al usuario un anclaje para controlar el movimiento excesivo de los brazos y estimular la estabilización de la cintura escapular. El usuario puede sujetarse con las dos manos para entrenar la estabilidad o con una sola mano. Existe un único tamaño para niños y adultos.



Figura 4a

Barra de agarre

Recomendaciones de uso

Figura 4b: La barra de agarre sirve como firme asidero para estabilizar una o ambas manos sobre una mesa o bandeja. La estabilidad en la mano y el brazo puede ayudar a controlar la cabeza y el tronco durante la sedestación y permite aumentar el uso funcional del otro brazo. Existe un único tamaño para niños y adultos.



Figura 4b

Anclaje de codo

Recomendaciones de uso

Figura 4c: El anclaje de codo estabiliza el brazo sobre una mesa o bandeja. Se puede utilizar un par para estabilizar ambos brazos. Aumenta la estabilidad del antebrazo y puede ayudar a controlar la cabeza y el tronco durante la sedestación y permitir aumentar el uso funcional del otro brazo.



Figura 4c

Se dispone de un único tamaño de anclajes del codo derecho e izquierdo para niños y adultos. Las personas con una distancia muñeca-codo superior a 8 pulgadas (20 cm) serán los que mayor provecho saquen del anclaje de codo.

Anclaje de muñeca

Recomendaciones de uso

Figura 5a: El uso del anclaje de muñeca tiene como fin estabilizar un brazo sobre una mesa o bandeja. Se puede utilizar un par para estabilizar ambos brazos. Al aumentar la estabilidad en el antebrazo, el anclaje de muñeca puede ayudar a controlar la cabeza y el tronco durante la sedestación y permitir aumentar el uso funcional del otro brazo. Existe un único tamaño para niños y adultos.



Figura 5a

Anclaje horizontal

Recomendaciones de uso

Figura 5b: El anclaje horizontal ofrece un firme asidero para estabilizar un brazo sobre una mesa o bandeja. El anclaje horizontal puede ayudar a controlar la cabeza y el tronco durante la sedestación y permite aumentar el uso funcional del otro brazo. Existe un único tamaño para niños y adultos.



Figura 5b

Anclaje de brazo

Recomendaciones de uso

Figura 5c: El anclaje de brazo tiene como fin para estabilizar un brazo sobre una mesa o bandeja. Se puede utilizar un par para estabilizar ambos brazos. Al aumentar la estabilidad en el antebrazo, el anclaje de brazo puede ayudar a controlar la cabeza y el tronco durante la sedestación y permitir aumentar el uso funcional del otro brazo.

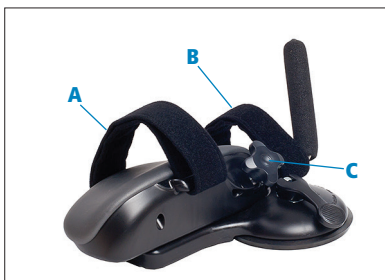


Figura 5c

Coloque el brazo en el acolchado del anclaje y asegúrelo con las correas para brazos (A) y muñecas (B). Las correas para los brazos y las muñecas se ajustan y sujetan con los cierres de velcro.

Mueva el asidero hacia atrás o hacia delante y gírelo aflojando el pomo giratorio (C).

Anclaje de brazo - Medidas del usuario	Pequeño	Grande
Interior del pulgar al codo	7½-12 pulgadas	10-15 pulgadas
	19-30 cm	25-38 cm



**Medidas clave del usuario:
parte interior del pulgar al
codo** Mida la distancia horizontal desde el codo doblado hasta el pulgar levantado. Elija el anclaje de brazo que se adapte al crecimiento.

Funcionamiento



Los anclajes funcionan mejor sobre una mesa o una bandeja limpia y lisa. La superficie debe ser muy lisa y estar completamente limpia para lograr un buen sellado. Si la ventosa no se agarra bien, límpiela con un trapo húmedo o aplique una fina capa de vaselina alrededor del borde de la almohadilla de goma para mejorar el vacío.

Figura 6a: Para apretar el anclaje de mano y el anclaje de muñeca, presione la ventosa y gire el asidero hacia la derecha, hasta que esté firme. Para retirarlo, gire el asidero hacia la izquierda.

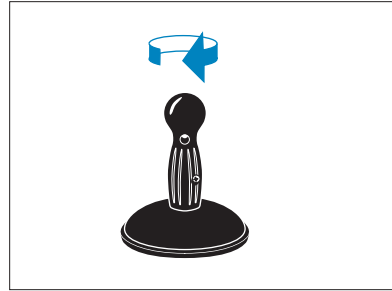


Figura 6a

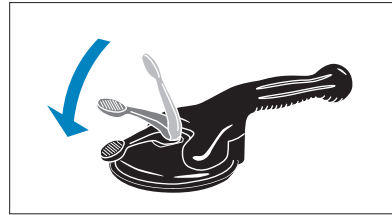


Figura 6b

Figura 6b: Los otros anclajes se aprietan presionando la ventosa y moviendo la palanca hacia abajo. Eleve la palanca para retirarlo.

Mantenimiento ?

Este producto está diseñado y probado para una vida útil de 5 años si se utiliza y mantiene de acuerdo con este manual. Los usuarios deben, en todo momento, asegurarse de que el producto permanezca en condiciones seguras y utilizables, lo que incluye el mantenimiento y las inspecciones regulares que se especifican en el manual.

Para prevenir fallos estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios el aflojamiento o la ausencia de tornillos, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas que faltan, la inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
- Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
- No use los componentes o productos de Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.
- Sustituya o repare los componentes o los productos que estén dañados o que parezcan inestables.
- Utilice solo repuestos autorizados de Rifton. La información sobre pedidos de piezas de recambio figura en la contraportada de este manual del producto.

Limpieza

Cuando sea necesario, limpie con toallitas desinfectantes o una solución con el 10 % de lejía como máximo. No utilice cantidades excesivas de agua.

La tapicería del anclaje de codo y del anclaje de muñeca se puede quitar y limpiar de la forma descrita arriba o con un limpiador comercial adecuado para piel de imitación.

Declaración de garantía


Si un producto Rifton se avería o no funciona durante el primer año, lo reemplazaremos sin cargo.

Materiales

- Los artículos metálicos de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc.) suelen ser galvanizados o niquelados o de acero inoxidable.
- Los artículos de tapicería (almohadillas, bloques de apoyo, apoyos almohadillados, etc.) suelen estar hechos de espuma de poliuretano con cubierta ignífuga de vinilo expandido.
- Las correas están hechas habitualmente de tejido de polipropileno o nailon.
- Normalmente, los componentes plásticos se moldean por inyección a partir de diversas resinas industriales.

Ningún componente contiene plomo ni látex de goma natural.

Modificaciones del usuario

 ADVERTENCIA Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere los productos o componentes de Rifton, ni utilice productos o componentes de Rifton combinados con productos de otros fabricantes. Rifton no se hace responsable de las posibles modificaciones o alteraciones realizadas en nuestros componentes o productos después de salir de nuestras instalaciones. Los clientes que modifiquen o alteren nuestros componentes o productos o los utilicen junto con productos de otros fabricantes, lo harán bajo su propia responsabilidad.

Información de contacto de Rifton



Correo electrónico
Sales@Rifton.com



Teléfono
800.571.8198
9-5 EST



Correo postal
Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471-0260



Fax
800.865.4674



En línea:
www.Rifton.com

Para pedir piezas de recambio

1. **Localice el número de identificación** del producto en la pequeña etiqueta blanca.
2. Tenga este número a mano cuando llame a su representante del servicio de atención al cliente al **800.571.8198**.

Utilice solo piezas de recambio suministradas por Rifton Equipment.

Nos complace suministrarle piezas de recambio. Aunque Rifton hace todo lo posible por suministrar piezas e instrucciones correctas para la reparación o renovación de su equipo, usted es responsable de garantizar que todas las reparaciones o modificaciones se realicen de forma correcta y segura.



Consulte detalles e información importantes en:
www.rifton.com/anchors