

# Silla Compass

Manual del producto de R310, R320, R330,  
R340 y R350



# Índice

---

Información importante	3
Mensajes sobre seguridad	4
Recomendaciones de uso y medidas del artículo	5
Revise su pedido	6
Componentes básicos	6
Accesorios	
Cinturón de seguridad	7
Patas de estabilidad	7
Funcionamiento	8-9
Mantenimiento, limpieza y garantía	10
Materiales y modificaciones del usuario	11


## IMPORTANTE

Guarde esta manual del producto para futuras consultas. Hay disponibles copias adicionales en [www.rifton.com](http://www.rifton.com)

## Claves para los usuarios

Use esta clave para determinar qué secciones de este manual del producto son importantes para usted.

 **Usuarios técnicos** Para profesionales que piden y montan productos Rifton.

 **Usuarios domésticos** Para cuidadores que usan productos Rifton regularmente.

 **Personal de mantenimiento** Para cualquier persona responsable del mantenimiento o de pedidos repetidos de productos y piezas Rifton.

## **ADVERTENCIA**



- Lea atentamente y comprenda la información de esta manual del producto antes de intentar utilizar el producto. La falta de seguimiento de los procedimientos y las instrucciones de este manual del producto puede causar lesiones graves o la muerte.
- Un profesional cualificado debe evaluar la idoneidad y seguridad de todo el equipo para cada usuario.
- Este producto está previsto para usuarios de juicio inestable, por lo que en todo momento se requiere la supervisión de un adulto.
- Para evitar caídas y lesiones, compruebe que las correas y los soportes estén bien sujetos en todo momento. Las correas y los soportes se suministran para la seguridad del usuario y deben ajustarse cuidadosamente para lograr la mayor comodidad y seguridad.
- Para evitar caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones:
  - Cuando use el cinturón de seguridad, asegúrese de que esté bien apretado.
- No use este producto para usuarios que no cumplan los límites de talla y peso especificados en este manual.
- Para prevenir fallos estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:
  - Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios para detectar el aflojamiento o la ausencia de tornillos, estrés del metal, grietas, piezas que faltan, inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
  - Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
  - No use los componentes o productos de Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.

## Recomendaciones de uso

La silla Compass de Rifton es un producto sanitario de clase 1. Es una silla para el aula con reposabrazos. Los laterales elevados del asiento brindan soporte lateral a la cadera, al tiempo que los reposabrazos altos ayudan a que los usuarios con el control muscular deficiente de la parte superior del tronco mantengan la postura. Juntas, estas características proporcionan límites sensoriales. La forma ergonómica del asiento y respaldo promueven la buena postura al estar sentado. Es posible ajustar levemente las patas respecto a la altura o inclinación del asiento. Se puede utilizar un cinturón de seguridad opcional para el posicionamiento y estabilización de la cadera.

## Medidas del usuario y dimensiones del artículo

Medidas del usuario, pulgadas (cm)	R310 tamaño 1	R320 tamaño 2	R330 tamaño 3	R340 tamaño 4	R350 tamaño 5
Altura	36-43 (91-109)	43-48 (109-122)	48-55 (122-140)	55-63 (140-160)	63+ (160+)
Rodilla a talón	9-11 (23-28)	10½-12½ (27-32)	12½-14½ (32-37)	14½-16½ (37-42)	16½-18½ (42-47)



### Medida clave del usuario: estatura

La estatura total del usuario es una guía general que le ayuda a seleccionar el tamaño adecuado. Elija un modelo que se adapte al crecimiento.

**Importante:** asegúrese de que la anchura, profundidad y altura de la silla se adapten a cada usuario y que el peso del usuario no sobrepase el peso máximo recomendado.

Medidas del artículo, pulgadas (cm)	R310	R320	R330	R340	R350
Altura del asiento	9, 10, 11 (23, 25, 28)	10½, 11½, 12½ (27, 29, 32)	12½, 13½, 14½ (32, 34, 37)	14½, 15½, 16½ (37, 39, 42)	16½, 17½, 18½ (42, 44, 47)
Profundidad del asiento	9½ (24)	11 (28)	12¾ (32,5)	14¾ (37,5)	16½ (42)
Anchura del asiento	10 ½ (27)	12¾ (31)	14 (36)	16¼ (41,5)	18¼ (46,5)
Altura del respaldo	9½ (24)	11 (28)	12½ (32)	14¾ (36,5)	16 (41)
Altura del reposabrazos desde el asiento	5½ (14)	6 (15)	7 (18)	8¼ (21)	8¾ (22,5)
Longitud del reposabrazos	6½ (17)	7½ (19)	8½ (22)	9¾ (24,5)	11 (28)
Carga máxima de trabajo, lb (kg)	100 (45)	120 (55)	175 (80)	220 (100)	250 (113)

## Revise su pedido

La silla Compass básica se proporciona totalmente montada, incluidas las cuatro patas ajustables con punta de caucho.

**Si su envío está incompleto o dañado de alguna manera a la llegada, llame al servicio de atención al cliente, al 800.571.8198.**

## Artículo básico



### Patas de altura regulable

**Figure 6a:** Pulse el botón y deslice la pata ajustable a la posición deseada.



Figura 6a

## Accesorios

### Cinturón de seguridad

**Figura 7a:** Fije el cinturón de seguridad con el clip al asiento cuando sea necesario para un usuario en particular por razones de seguridad o soporte postural. El cinturón de seguridad se abre y cierra delante, con una hebilla de apertura lateral. La hebilla se puede posicionar a uno u otro lados, o en el centro.



Figura 7a

**Figura 7b:** Retire el cinturón de seguridad presionando juntas las dos pestañas de plástico en el clip de montaje del cinturón de seguridad (A), bajo el asiento.



Figura 7b

### Patas de estabilidad

**⚠ PRECAUCIÓN** No incline nunca el asiento cuando las patas de estabilidad estén en uso, para prevenir su rotura y posibles lesiones.

**Figura 7c:** En el caso de usuarios que requieren mayor estabilidad para evitar que la silla se incline hacia atrás, las patas de estabilidad se pueden acoplar a las patas posteriores, en lugar de las patas ajustables estándar.



Figura 7c

# Funcionamiento



La silla Compass está destinada a niños y adultos con discapacidades leves que requieren un poco de soporte postural adicional. Los reposabrazos son suficientemente cortos para posicionar al estudiante cerca de la mesa y tienen la altura óptima para facilitar las transferencias.

Algunos usuarios se podrían beneficiar del soporte adicional de un cinturón de seguridad opcional para mejorar su seguridad, comodidad y funcionamiento cuando están sentados.

**Figura 8a:** La amplitud del área de base de la silla Compass la vuelve inherentemente estable. En el caso de usuarios que requieran incluso mayor estabilidad para evitar caídas, se pueden acoplar las patas de estabilidad opcionales a las patas posteriores.



Figura 8a



## Inclinación leve

**⚠ ADVERTENCIA** Para evitar caídas y lesiones:

Ajustar la silla para que se incline hacia atrás acortando las patas posteriores, al mismo tiempo que se extienden las patas anteriores, hará que la silla sea menos estable. Esta posición se debe usar con precaución y solo en el caso de usuarios que no tienden a caer hacia atrás.

**Figura 9a:** Ajustar las patas anteriores a longitud mayor o menor que las patas posteriores hace posible que se posicione la silla con una inclinación posterior o anterior leve.



Figura 9a

## Mantenimiento 🗝

Este producto está diseñado y probado para una vida útil de 5 años si se utiliza y mantiene de acuerdo con este manual. Los usuarios deben, en todo momento, asegurarse de que el producto permanezca en condiciones seguras y utilizables, lo cual incluye el mantenimiento y las inspecciones regulares que se especifican en este manual.

Para prevenir fallos estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios el aflojamiento o la ausencia de tornillos, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas que faltan, la inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
- Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
- No use los componentes o productos de Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.
- Sustituya o repare los componentes o los productos que estén dañados o que parezcan inestables.
- Utilice solo repuestos autorizados de Rifton. La información sobre pedidos de piezas de recambio figura en la contraportada de este manual del producto.

## Limpieza 🧑 🏠 🗝

Limpie el producto con toallitas desinfectantes o con una solución de hasta un 10 % de lejía.

## Declaración de garantía 🧑 🏠 🗝


Si un producto Rifton se avería o no funciona durante el primer año, lo reemplazaremos sin cargo.

## Materiales

- Los elementos de acero (tuercas, tornillos) están galvanizados con zinc o níquel para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión.
- El chasis es una estructura de aluminio atornillada, con recubrimiento anodizado negro.
- Las correas están hechas habitualmente de tejido de polipropileno o nailon.
- Normalmente, los componentes plásticos se moldean por inyección a partir de diversas resinas industriales.

Todos los materiales están exentos de látex, plomo y ftalatos.

## Modificaciones del usuario

** ADVERTENCIA** Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere los productos o componentes de Rifton, ni utilice productos o componentes de Rifton combinados con productos de otros fabricantes. Rifton no se hace responsable de las posibles modificaciones o alteraciones realizadas en nuestros componentes o productos después de salir de nuestras instalaciones. Los clientes que modifiquen o alteren nuestros componentes o productos o los utilicen junto con productos de otros fabricantes, lo harán bajo su propia responsabilidad.

## Información de contacto de Rifton



**Correo electrónico**  
[Sales@Rifton.com](mailto:Sales@Rifton.com)



**Teléfono**  
800.571.8198  
9-5 EST



**Correo postal**  
Rifton Equipment  
PO Box 260  
Rifton NY 12471-0260



**Fax**  
800.865.4674



**En línea:**  
[www.Rifton.com](http://www.Rifton.com)

## Para pedir piezas de recambio

1. **Localice el número de identificación** del producto en la pequeña etiqueta blanca.
2. Tenga este número a mano cuando llame a su representante del servicio de atención al cliente al **800.571.8198**.

### **Utilice solo piezas de recambio suministradas por Rifton Equipment.**

Nos complace suministrarle piezas de recambio. Aunque Rifton hace todo lo posible por suministrar piezas e instrucciones correctas para la reparación o renovación de su equipo, usted es responsable de garantizar que todas las reparaciones o modificaciones se realicen de forma correcta y segura.



Consulte detalles e información importantes acerca de la silla Compass en:  
[www.rifton.com/compasschair](http://www.rifton.com/compasschair)